

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów
medycznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **05**

Wersja arkusza: **AG**

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL
i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

MED.12-05-20.06-AG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/ miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Zadanie egzaminacyjne

Do Centralnej Sterylizatorni dostarczono z Bloku Operacyjnego skontaminowane wyroby medyczne zgodnie z wykazem zamieszczonym w Tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz wyrobów medycznych dostarczonych do Centralnej Sterylizatorni

kleszczyki Kocher	1 szt.
korek do wenflonu	2 szt.
kleszczyki Pean	1 szt.
pęseta anatomiczna	2 szt.
igła do iniekcji	2 szt.
nożyczki chirurgiczne	1 szt.

Dla wyrobów podlegających przygotowaniu do ponownego użycia wypełnij *Kartę dekontaminacji wyrobów medycznych*.

Uzupełnij *Protokół niezgodności* dla wyrobów medycznych, które nie powinny być dostarczone do Centralnej Sterylizatorni.

Przystępując do wykonania zadania zastosuj środki ochrony indywidualnej właściwe dla rodzaju wykonywanych procedur.

Z zestawu narzędzi i sprzętu medycznego znajdującego się na tacy na stanowisku egzaminacyjnym usuń wyroby medyczne jednorazowego użycia i umieść je w twarodościennym pojemniku na odpady medyczne.

Tacę z pozostałymi narzędziami włóż do komory zlewozmywaka.

Po wykonaniu segregacji wyrobów medycznych zdejmij zużyte środki ochrony indywidualnej i wykonaj higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe'a.

UWAGA – *Zasygnalizuj przez podniesienie ręki gotowość do wykonania segregacji wyrobów medycznych, higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj te czynności.*

Wykonaj test kontroli zgrzewu, opisz go datą wykonania, a w miejsce podpisu wpisz XX.

Przygotuj 10 szt. kompresów gazowych o wymiarach 10 cm x 10 cm.

Kompresy zapakuj razem, w pojedynczą warstwę rękawa papierowo-foliowego. Wewnątrz pakietu umieść wskaźnik chemiczny typu 4.

Na każdym etapie wykonania zadania, stosuj środki ochrony indywidualnej właściwe dla rodzaju wykonywanych procedur.

Wypełnij Etykietę, ustal 3- miesięczną datę ważności pakietu. Odbiorcą pakietu jest Blok Operacyjny

Wytnij Etykietę z arkusza egzaminacyjnego i przyklej do pakietu taśmą bez wskaźnika. Gotowy pakiet z kompresami gazowymi pozostaw na miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN.

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- Karta dekontaminacji wyrobów medycznych,
- Protokół niezgodności,
- Test kontroli zgrzewu,
- Pakiet z kompresami gazowymi,
- Etykieta

oraz

przebieg segregacji wyrobów medycznych, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a.

Karta dekontaminacji wyrobów medycznych

Nazwa wyrobu medycznego, liczba sztuk	Parametry procesu dezynfekcji termicznej A₀ = 3000		Testy kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej Tak/Nie**		Parametry procesu sterylizacji (zmienne krytyczne dla procesów sterylizacji parowej)	Kontrola wsadu (nazwa i typ wskaźnika chemicznego użytego w PCD)***
	Wskaźnik kontroli parametrów dezynfekcji termicznej		Test kontroli jakości mycia			
A	B*	C*	D*	E*	F*	
	Temperatura°C			Temp. 134°C		
				Czas min		
	Czasmin			Ciśnienie..... atm.		

* w kolumnach B, C, D, E, F - dokonaj jednego wpisu dla wszystkich wyrobów medycznych

** wpisz właściwe

*** wypisz nazwy i typy wszystkich wskaźników chemicznych, które można użyć do kontroli wsadu

Protokół niezgodności

z dnia

(dd-mm-rrrr)

Nazwa oddziału	
Opis niezgodności	
Nazwa i liczba sztuk wyrobów medycznych przekazanych do utylizacji*	
Nazwa i liczba sztuk wyrobów medycznych przekazanych do utylizacji*	
Podpis pracownika wypełniającego protokół	

*w każdym wierszu wpisz jeden rodzaj wyrobów medycznych

-----**wytnij etykietę poniżej**-----

Etykieta*

Zawartość pakietu	
Data ważności pakietu	 dd-mm-rrrr
Numer sterylizatora	3
Numer procesu (lub cyklu) sterylizacji.	1234
Kod osoby wykonującej pakiet	

* na etykietę wpisz pozostałe informacje pozwalające
na identyfikację pakietu