

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Karta dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych

Wpisane:

1	w wierszu Optyka endoskopowa w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Tak; D: Nie; E: Nie dotyczy						
2	w wierszu Zestaw kleszczyków w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: parą wodną						
3	w wierszu Wziernik nosowy w kolumnie: A: Otolaryngologia; B: manualna przez zanurzenie; C: Tak; D: Nie; E: Nie dotyczy						
4	w wierszu Napęd ortopedyczny bez nasadek w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez przecieranie; C: Nie; D: Nie; E: parą wodną						
5	w wierszu Kabel do stymulatora w kolumnie: A: Kardiochirurgia; B: manualna przez przecieranie; C: Nie; D: Nie; E: tlenkiem etylenu						
6	w wierszu Maski krtaniowa w kolumnie: A: OIOM; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: parą wodną						
7	w wierszu Fartuch chirurgiczny w kolumnie : A: Blok Porodowy; B: Nie dotyczy; C: Tak; D: Nie; E: Nie dotyczy						
8	w wierszu Instrument laparoskopowy kaniulowany w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: tlenkiem etylenu						

Rezultat 2: Etykieta

Wpisane:

1	w wierszu Nazwa oddziału: Blok Operacyjny						
2	w wierszu Nazwa zestawu: Zestaw kleszczyków						
3	w wierszu Data sterylizacji: data egzaminu (dd-mm-rr)						
4	w wierszu Data przydatności do użycia: Dwa tygodnie od daty egzaminu (dd-mm-rr)						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Pakiet z Zestawem kleszczyków

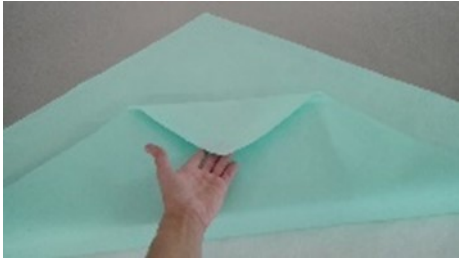
1	Pakiet wykonany jest techniką skośną, zaklejony jest taśmą wskaźnikową lub taśmą neutralną oraz wskaźnikową, taśma przyklejona jest po obu stronach wystającej wypustki/rogu papieru krepowanego						
2	Pakiet wykonany jest estetycznie w taki sposób, że papier krepowany nie jest pognieciony, nie jest rozerwany						
3	Do pakietu przyklejona jest Etykieta taśmą neutralną						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i pakietu z Zestawem kleszczyków

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii: pierścionków, bransoletki, innych ozdób, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami złączonymi, zmienił ręce						
3	skompletował z przygotowanych na egzamin narzędzi Zestaw kleszczyków: pean - 1 szt., kocher - 1 szt.						
4	skontrolował czystość oglądając powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne obu narzędzi						
5	naniósł środek konserwujący w obrębie przegubów obu narzędzi, następnie wykonał ruchy otwierania i zamykania obu narzędzi, narzędzia ułożył na tacy						
6	umieścił na tacy chemiczny wskaźnik zintegrowany/typ 5						
7	umieścił tacę z Zestawem kleszczyków po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego, zawinął wewnętrzny arkusz zakrywając tacę z narzędziami, sformułował trójkąt						
8	pozostawił wypustkę/róg z pierwszej warstwy papieru krepowanego						
9	wykonując drugą warstwę opakowania z papieru w innym kolorze, również sformułował trójkąt (jak w kryterium 7) oraz w ostatnim etapie pakowania pozostawił wypustkę/róg papieru						
10	uporządkował stanowisko pracy: zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym, ułożył wszystkie materiały, z których korzystał, wyrzucił czepek do kosza z odpadami						

Egzaminator

imię i nazwisko

data i czytelny podpis