

**EGZAMIN ZAWODOWY  
 Rok 2021  
 ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
 do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-21.01-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
 2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       –

Kod egzaminatora

Data egzaminu          
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

**Rezultat 1: Protokół niezgodności**

*Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej*

*Wpisane:*

1	<b>Data sporządzenia protokołu:</b> data zgodna z datą egzaminu								
2	<b>Opis niezgodności w zestawie (nazwa i ilość wyrobu medycznego):</b> nożyczki chirurgiczne - 1szt., skalpel chirurgiczny - 1 szt.								
3	<b>Opis przyczyny niezgodności:</b> wyroby medyczne jednorazowego użycia/sprzęt jednorazowego użycia/narzędzia jednorazowego użycia								
4	<b>Podjęte działania (kogo powiadomiono):</b> powiadomiono użytkownika lub personel oddziału lub kierownika lub pielęgniarkę oddziałową lub utylizacja <i>Dopuszcza się inne sformułowania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej.</i>								

**Rezultat 2: Karta procesów sterylizacji**

*Wpisane:*

1	<b>Data procesu:</b> data zgodna z datą egzaminu <b>Nazwa oddziału:</b> Oddział Chirurgii Ogólnej								
2	<b>Nazwa zestawu:</b> Zestaw zabiegowy nr 1								
3	<b>Kolumny A i B:</b> serweta chirurgiczna barierowa –1 szt., bandaż bawełniany –1 szt., kompresy gazowe 10 cm x 10 cm –10 szt., fartuch barierowy – 2 szt., gaza opatrunkowa 1m <sup>2</sup> - 1 szt.								
4	<b>Kolumna C:</b> papier krepowany/dwie warstwy lub dwie warstwy papieru krepowanego								
5	<b>Kolumna D:</b> 130 punktów, 2 miesiące								
6	<b>Kolumna E:</b> chemiczny wskaźnik wieloparametrowy typu 4								
7	<b>Kolumna F:</b> sterylizacja parowa lub sterylizacja parą wodną								
8	<b>Kolumna G:</b> temperatura 134°C								
9	<b>Kolumna G:</b> czas 5 minut								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Etykieta**

*Wpisane:*

1	<b>Nazwa oddziału:</b> Oddział Chirurgii Ogólnej						
2	<b>Zawartość pakietu (nazwa zestawu):</b> Zestaw zabiegowy nr 1						
3	<b>Data sterylizacji:</b> data zgodna z datą egzaminu						
4	<b>Data ważności pakietu:</b> data o dwa miesiące (+/-2dni) późniejsza od daty egzaminu						

**Rezultat 4: Pakiet z Zestawem zabiegowym nr 1**

*Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4, 5 i 6 otwiera pakiet*

1	Pakiet zaklejonny jest taśmą ze wskaźnikiem oraz bez wskaźnika						
2	Pakiet oznakowany jest wypisaną etykietą, przyklejoną do pakietu taśmą bez wskaźnika						
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym						
4	Opakowanie pakietu składa się z dwóch niezależnych warstw papieru krepowanego						
5	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4						
6	Wewnątrz pakietu znajdują się wyłącznie: serweta chirurgiczna barierowa – 1 szt., bandaż bawełniany – 1 szt., kompresy gazowe 10 cm x10 cm – 10 szt., fartuch barierowy – 2 szt., gaza opatrunkowa 1m <sup>2</sup> – 1 szt.						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie pakietu do sterylizacji**

*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	wykonał pierwszy etap dezynfekcji rąk: naniósł środek dezynfekcyjny na suche dłonie						
3	wykonał co najmniej pięciokrotnie wszystkie etapy dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a						
4	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym						
5	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników papieru krepowanego w kolorze zielonym						
6	sformułował z papieru koloru białego trójkąt oraz pozostawił po kolejnych krokach pakowania wypustkę z jednego z rógów papieru (jak w kryterium 5) ułatwiający jałowe otwarcie pakietu						
7	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
8	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*