

**EGZAMIN ZAWODOWY  
 Rok 2021  
 ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
 do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-21.01-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**  
 Numer zadania: **03**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
 2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       –

Kod egzaminatora

Data egzaminu          
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

**Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji**

*Dopuszcza się inne sformułowania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej*

*Wpisane:*

1	w wierszu Zestaw do szycia: <b>A:</b> 2; <b>B:</b> Poradnia chirurgiczna; <b>C:</b> 2; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> NIE; <b>F:</b> NIE						
2	w wierszu Igotrzymacz z połączanymi uchwytami: <b>A:</b> 10; <b>B:</b> Poradnia chirurgiczna; <b>C:</b> 2; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> TAK, 2 szt.; <b>F:</b> TAK, 2 szt.						
3	w wierszu Nożyczki chirurgiczne: <b>A:</b> 4; <b>B:</b> Poradnia chirurgiczna; <b>C:</b> 2; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> TAK, 2 szt.; <b>F:</b> TAK, 1 szt.						
4	w wierszu Układ rur oddechowych do respiratora: <b>A:</b> 2; <b>B:</b> OIOM; <b>C:</b> 1; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> TAK, 2 szt.; <b>F:</b> NIE						
5	w wierszu Maseczki anestezyjologiczne: <b>A:</b> 3; <b>B:</b> OIOM; <b>C:</b> 1; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> TAK, 1 szt.; <b>F:</b> NIE						
6	W wierszu Worek Ambu: <b>A:</b> 2; <b>B:</b> OIOM; <b>C:</b> 1; <b>D:</b> 93°C/10 minut; <b>E:</b> NIE; <b>F:</b> TAK, 1 szt.						

**Rezultat 2: Karta sterylizacji Nr 1**

*Wpisane:*

1	w wierszu Parametry procesu: 121°C/20 minut						
2	w wierszu Maseczki anestezyjologiczne: <b>A:</b> 2; <b>B:</b> OIOM; <b>C:</b> rękaw papierowo-foliowy						
3	W wierszu Worek Ambu: <b>A:</b> 1; <b>B:</b> OIOM; <b>C:</b> rękaw papierowo-foliowy						
4	W kolumnie Nazwa wyrobów medycznych/zestawów: <b>NIE WPISANE</b> Układ rur oddechowych do respiratora						
5	W kolumnach <b>D:</b> Typ 4; <b>E:</b> Typ 5						

Numer stanowiska


**Rezultat 3: Karta sterylizacji Nr 2**

*Wpisane:*

1	Parametry procesu: 134°C/7minut						
2	W wierszu Elektroda monoploarna: <b>A:</b> 3; <b>B:</b> Blok Operacyjny; <b>C:</b> dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego						
3	W wierszu Igotrzymacz z połączanymi uchwytyami: <b>A:</b> 6; <b>B:</b> Poradnia chirurgiczna; <b>C:</b> rękaw papierowo-foliowy						
4	W wierszu Zestaw do endoprotezy: <b>A:</b> 2; <b>B:</b> Blok Operacyjny Urazowy; <b>C:</b> dwie warstwy rękawa papieru krepowanego						
5	W wierszu Nożyczki chirurgiczne: <b>A:</b> 1; <b>B:</b> Poradnia chirurgiczna; <b>C:</b> dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego						

**Rezultat 4: Pakiet z Zestawem do toalety jamy ustnej**

*Linijka do oceny 4. kryterium znajduje się na stanowisku do pakowania*

1	W pakiecie umieszczone są kleszczyki Pean uchwyty w kierunku otwierania pakietu						
2	W pakiecie umieszczone są grzbietami w kierunku otwierania pakietu kompresy gazowe 5 - szt.						
3	W pakiecie umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4						
4	Od strony otwierania pakietu pozostawiony jest margines minimum 2 cm						
5	Do pakietu od strony folii przyklejona jest neutralną taśmą Etykieta						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 5: Etykieta**

*Wpisane:*

1	Zawartość pakietu (nazwa zestawu): Zestaw do toalety jamy ustnej						
2	Oddział: Oddział Wewnętrzny						
3	Data sterylizacji: data egzaminu						
4	Data ważności: 5 miesięcy (+/-2 dni) od daty egzaminu						

**Przebieg 1: Wykonanie dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontrola czystości i konserwacji kleszczyków Pean oraz pakowanie Zestawu do toalety jamy ustnej**  
*Zdający zgłosi gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki.*

*Zdający:*

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii: pierścionków, bransoletki, innych ozdób; wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie. W jednym z etapów pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami złączonymi, zmienił ręce						
3	z zestawu narzędzi wybrał kleszczyki Pean						
4	skontrolował wizualnie pod lupą czystość powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych kleszczyków						
5	następnie naniósł środek konserwujący w obrębie przegubu narzędzia, a następnie wykonał kilkakrotnie ruchy otwierania i zamykania narzędzia						
6	odliczył 5 sztuk kompresów gazowych i umieścił je razem z kleszczykami w odciętym rękawie papierowo-foliowym, wykonał zgrzew						
7	uporządkował stanowisko pracy: zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym. Ułożył wszystkie materiały, z których korzystał, wyrzucił czepek do kosza z odpadami						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*