

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Protokół niezgodności

Wpisane w wierszu:

1	Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. nasadki do skalpela						
2	Opis niezgodności ilościowej: brak 2 szt. rozszerzadeł ginekologicznych Hegar						
3	Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. klemu okienkowego						
4	Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. wziernika nosowego						
5	Opis niezgodności jakościowej: zamiast elektrod bipolarnych dostarczono elektrody monopolarne						

Rezultat 2: Karta przygotowania wyrobów medycznych do sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Nasadka do skalpela – 1 szt.						
2	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Rozszerzadło ginekologiczne Hegar – 1 szt.						
3	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Klem okienkowy – 1 szt.						
4	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Wziernik nosowy – 2 szt.						
5	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Hak brzuszny trzyżyłkowy – 1 szt.						
6	Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Elektroda monopolarna – 2 szt.						
7	Konserwacja narzędzi Tak/Nie*: TAK wyłącznie w 3 wierszach: Klem okienkowy, Hak brzuszny trzyżyłkowy, Wziernik nosowy						
8	Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 5 lat - w wierszu Elektroda monopolarna						
9	Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 2 miesiące - wyłącznie w 4 wierszach: Nasadka do skalpela, Rozszerzadło ginekologiczne Hegar, Szpatułka metalowa, Wziernik uszny						
10	Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 1 rok w 3 wierszach: Klem okienkowy, Hak brzuszny trzyżyłkowy, Wziernik nosowy						

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji oraz pakiety z naklejonymi Etykietami

Uwaga: Linijka do oceny kryteriów 3.2 i 3.6 znajduje się na stanowisku pakowania narzędzi

1	W Karcie procesów sterylizacji wpisane kolejno: 7 minut , Wskaźnik Nr 1 , Wskaźnik Nr 4 , Wskaźnik Nr 3						
Pakiety z naklejonymi etykietami							
2	Kleszczyki Pean zapakowane są w jedną warstwę rękawa papierowo-foliowego, zgrzew pakieta od strony otwierania wykonany jest w odległości min. 2 cm od krawędzi						
3	Kleszczyki Pean związane są na pierwszy ząbek, uchwyty kleszczyków Pean skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania pakieta						
4	W pakiecie z kleszczykami Pean umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 5 (zintegrowany)						
5	Etykieta na pakiecie z kleszczykami Pean - w wierszu Data ważności wpisane: 3 miesiące od daty egzaminu (+/-2 dni), etykieta przyklejona jest do pakieta taśmą bez wskaźnika						
6	Igłotrzymacz zapakowany jest w dwie, niezależnie zgrzane warstwy rękawa papierowo-foliowego zgodnie z zasadą papier do papieru, folia do folii. Każda warstwa opakowania zgrzana jest z dwóch stron. Warstwa wewnętrzna nie jest podwinięta z żadnej strony. Zgrzewy obu warstw opakowania od strony otwierania wykonane są w odległości min. 2 cm od krawędzi						
7	Igłotrzymacz związany jest na pierwszy ząbek, uchwyty igłotrzymacza skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania pakieta						
8	W pakiecie z igłotrzymaczem umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4 (wieloparametrowy)						
9	Etykieta na pakiecie z igłotrzymaczem - w wierszu Data ważności wpisane: 6 miesięcy od daty egzaminu (+/-2 dni), etykieta przyklejona jest do pakieta taśmą bez wskaźnika						
10	Pakiety wyglądają estetycznie, nie są zaplamione środkiem konserwującym, nie są pogniecione						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontroli czystości i konserwacji kleszczyków Pean i igłotrzymacza

Zdający:

1	założył czepek ochronny, zakrywając nim wszystkie włosy						
2	wykonał 6 etapów higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffa, każdy etap powtórzył co najmniej pięciokrotnie						
3	wybrał z zestawu narzędzi: kleszczyki Pean i igłotrzymacz. Otwierając kolejno narzędzia kontrolował czystość wszystkich powierzchni						
4	po kontroli czystości naniósł środek konserwujący tylko w obrębie przegubów narzędzi						
5	rozprowadził środek konserwujący poprzez wykonanie kilkakrotnych ruchów otwierania i zamykania narzędzi						
6	uporządkował stanowisko pracy, na blacie nie pozostawił odpadów z rękawa papierowo-foliowego, wykonał dezynfekcję stanowiska						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis